













W oparciu o ustaloną moc addycji, należy znaleźć pierwszą soczewkę próbną w tabeli

ADDYCJA	OKO	WYBÓR SOCZEWKI
+0,75D to +1,25D	Oko dominujące	 LOW
	Oko niedominujące	 LOW
+1,50D to +1,75D	Oko dominujące	 MID
	Oko niedominujące	 MID
+2,00D to +2,50D	Oko dominujące	 MID
	Oko niedominujące	 HIGH

Zanim ocenisz ostrość widzenia, zapewnij pacjentowi 10 minutową adaptację w warunkach rzeczywistych (poza gabinetem).



Jeżeli niezbędne jest dokonanie korekty, skorzystaj z poniższych tabel.
Nadrefrakcja nie jest zalecana.

POPRAWA JAKOŚCI WIDZENIA W DALI	POPRAWA JAKOŚCI WIDZENIA W BLIŻY
SOCZEWKA JEDNOOGNISKOWA ACUVUE®	 LOW
 LOW	 LOW +0,25D[^]
 LOW	 MID
 MID	 MID +0,25D[^]
 MID	 MID
 MID +0,25D[^]	 HIGH +0,25D[^]

[^] Dodaj +0,25 D do mocy korekcyjnej w dali.